



Kontrolní sada Diazyme Lipoprotein (a)

Určené použití

Kontrolní sada Diazyme Lipoprotein (a) je určena k monitorování kontroly kvality výsledků získaných pomocí reagensů Diazyme Lipoprotein (a) Assay metodou turbidimetrie. Pouze pro diagnostické použití *in vitro*.

Shrnutí

Kontrolní sada Diazyme Lipoprotein (a) [Lp(a)] (REF DZ131B-

CON) je sada dvou KONTROLA úrovní. Tyto dvě úrovně mají být

Používá se jako kontrola kvality testu Diazyme Lipoprotein(a) Assay (REF DZ131A; REF DZ131B); což je latexový imunoturbidimetrický test pro kvantifikaci lipoproteinu (a) v lidském séru a plazmě.

Reagencie – pracovní roztoky

Reaktivní složky

- Lidské sérum a přísady

Nereaktivní složky

- Azid sodný (NaN_3) <0,1 %

Sada Diazyme Lipoprotein(a) Control Set je dvoustupňová sada dodávaná v tekuté stabilní formě (2 x 1 ml). Kontrola je vyrobena z lidského séra. Koncentrace se liší podle šarže a koncentrace lipoproteinu (a) jsou vyjádřeny A v mg/dl.

Hodnoty kalibrátoru

Přesné hodnoty jsou uvedeny na dostupném certifikátu analýzy.

Bezpečnostní opatření a varování

1. Pro diagnostické použití *in vitro*.
2. Při manipulaci se všemi laboratorními reagensy dodržujte běžná bezpečnostní opatření. Každá jednotka séra od dárce použítá při přípravě této kalibrační sady byla testována metodami schválenými FDA a byla shledána negativní na protilátky proti viru lidské imunodeficiency (HIV I/II Ab), povrchový antigen hepatitidy B (HBsAg) a protilátky proti viru hepatitidy C (HCV). Jelikož však žádná metoda nemůže poskytnout úplnou jistotu ohledně absence infekčních agens, je třeba s tímto materiálem a všemi vzorky pacientů zacházet tak, jako by mohly přenášet infekční onemocnění, a odpovídajícím způsobem je likvidovat.
3. Další bezpečnostní informace týkající se skladování a manipulace s tímto produktem jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto produktu. Chcete-li získat bezpečnostní list, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznických služeb na čísle 858-455-4768.
4. Zamezte kontaktu s pokožkou a očima.
5. Obsahuje azid sodný, který může reagovat s olověnými nebo měděnými trubkami a vytvářet výbušné sloučeniny. Při likvidaci tohoto činidla propláchněte odtoky velkým množstvím vody.

Manipulace

Sada Diazyme Lipoprotein(a) Control Set je dodávána v tekuté stabilní formě a je připravena k použití. Před každým použitím pečlivě promíchejte.

Skladování a stabilita

Skladujte při teplotě 2 až 8 °C. **NEZMRAZUJTE.**

Poznámka: Uchovávejte pevně uzavřené, pokud se nepoužívá.

Stabilita

- Neotevřené lahvičky: stabilita je zajištěna do data expirace uvedeného na štítku při skladování při teplotě 2 až 8 °C.
- Otevřené lahvičky: otevřené lahvičky jsou stabilní po dobu až 45 dnů při skladování při teplotě 2 až 8 °C.

Dodávané materiály

Sada Diazyme Lipoprotein(a) Control Set se skládá ze 2 lahviček.

Potřebné materiály (nejsou součástí balení)

- Reagencie pro test Diazyme Lipoprotein(a) (REF DZ131A; DZ131B)
- Obecné laboratorní vybavení

Test

Připravte Kontrolu 1 a 2 podle pokynů v části Manipulace. Spusťte stejně jak u vzorku pacienta.

