

F2400

Rychlý návod

STANDARD™
F2400



Spuštění přístroje:


Přístroj zapnete vypínačem na levém boku přístroje.

Po spuštění budete vyzváni k zadání přihlašovacího jména, které je defaultně nastaveno na **admin**. K tomuto účtu je heslo **1111**

Uživatelsky je možné vytvořit více přihlašovacích účtů


Pracovní prostředí:

V hlavní nabídce stiskněte ikonku „Work Place“

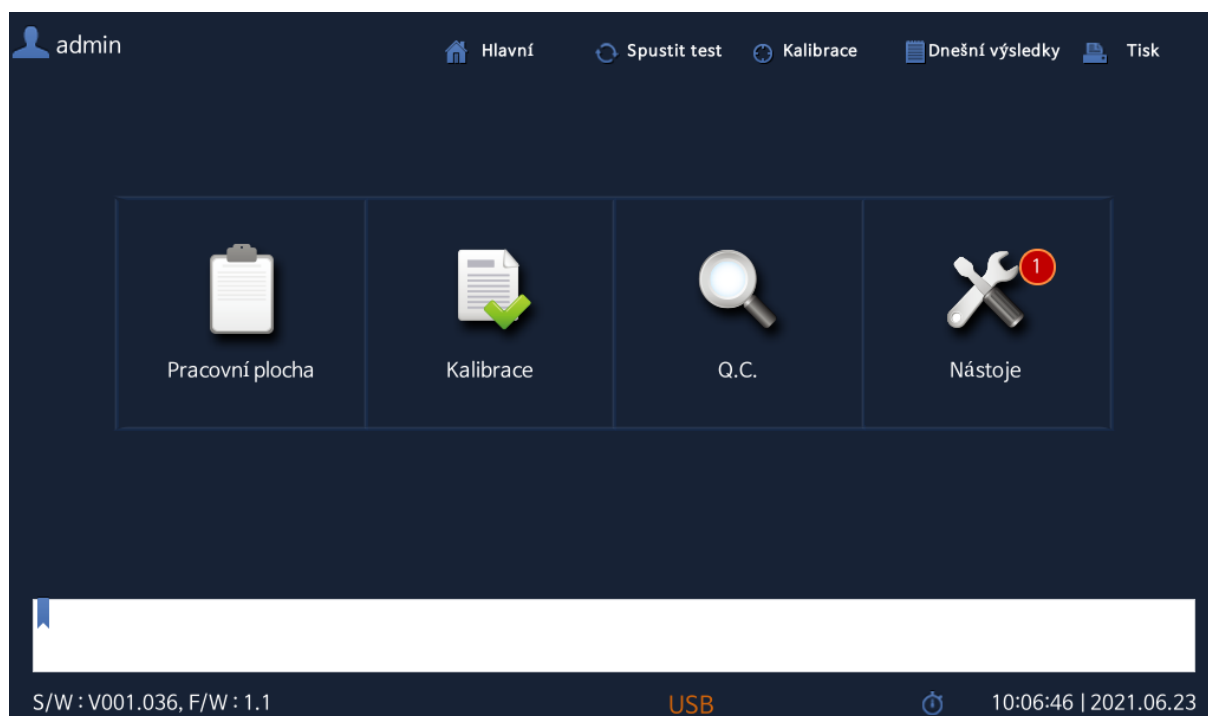

V pracovním prostředí máte na výběr ze tří možností:

Run Test, Test Status, Result Review

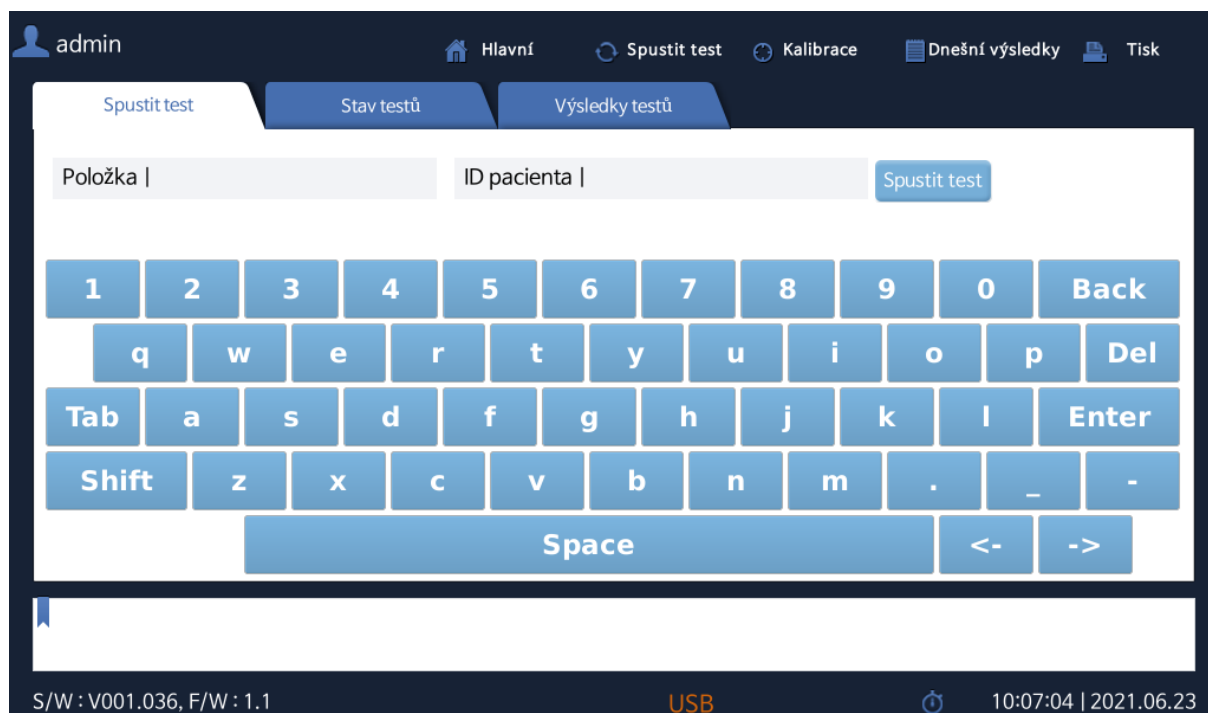

„Run Test“ Menu

Sekce Run Test, slouží pro zadávání nových testů.


Postup měření:

1. Zadejte ID pacienta pro snadné budoucí přiřazení (Je možné používat písmena i čísla) a stiskněte modré tlačítko „Run Test“. *Test je možné spustit i bez zadaného ID pacienta.*
2. Přístroj vás vyzve ke vložení kazetky („Insert Device“). Kazetku vložte 2D kódem nahoru a směrem do přístroje. Přístroj si sám načte, o jaký test se jedná a vyzve vás k dalšímu postupu




Měření COVID 19:

1. Po vložení kazetky vás přístroj vyzve ke zvolení metody odběru vzorku. Pro sťěr z nosohltanu nebo nosní dutiny vyberte možnost „Sterile Swab“
2. Na obrazovce se objeví jednoduchý návod pro použití testu. Po vložení vzorku do bufferu, zamíchání a nakapání vzorku na kazetku, stiskněte tlačítko „Test Start“ na pravé straně displeje.

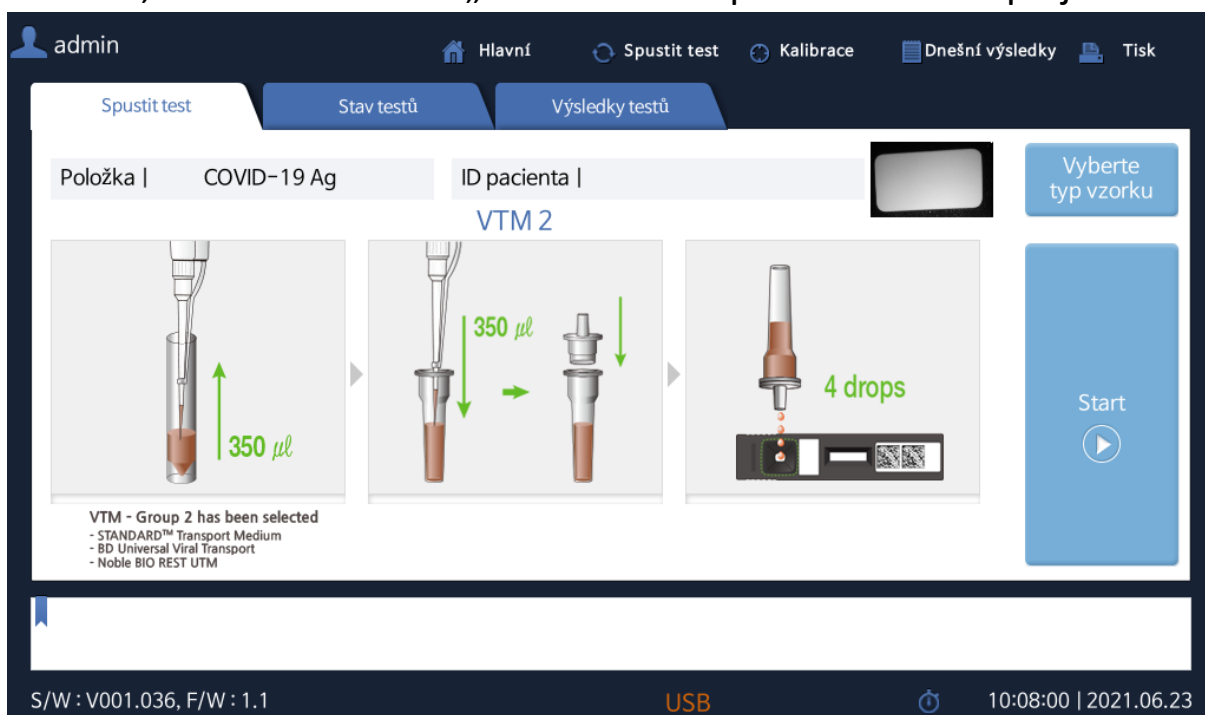


3. Přístroj si kazetku vloží do pořadníku a bude ji inkubovat příslušnou dobu.

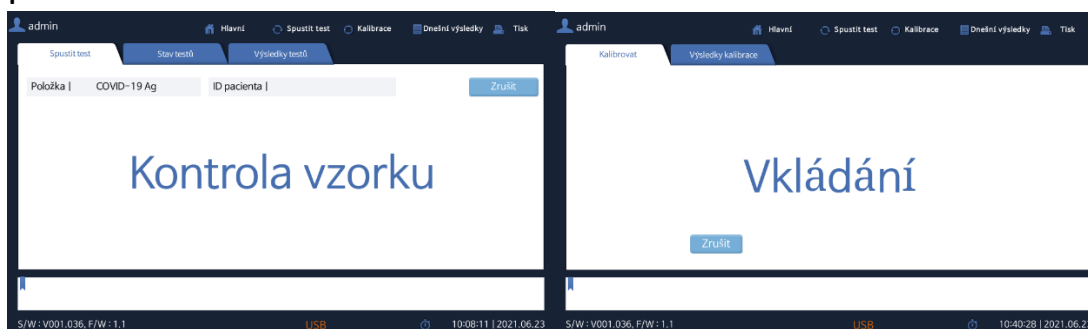

4. Po uplynutí doby pro průběh reakce přístroj odečte hodnotu testu, vytiskne výsledek a kazetku vyhodí podavačem na pravém boku přístroje.

„Test Status“ Menu

Sekce Test Status slouží ke zjištění stavu měřených testů.

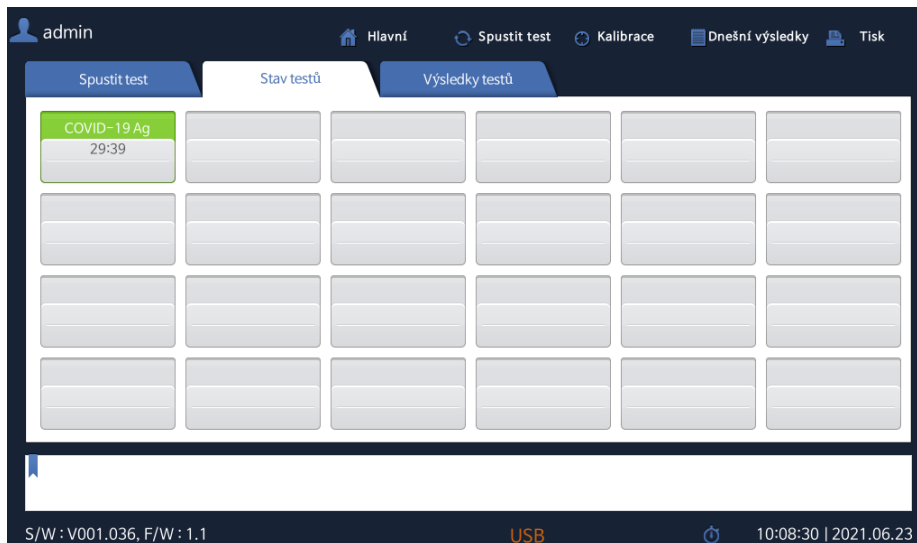

Zelený rámeček – Test probíhá. U testu se můžete podívat na čas zbývající do konce testování.

Černý rámeček – Chybný test

Modrý rámeček – Test s negativním výsledkem – nebo výsledkem v rámci normálních hodnot

Červený rámeček – Test s pozitivním výsledkem – neboli s výsledkem mimo rámec normálních hodnot

Při stisknutí konkrétního měření se vám zobrazí detail testu, který obsahuje podrobnosti o testu s přesnými hodnotami, in



formacemi o šarži testu, verzi softwaru atd.

„Result Review“ Menu

Sekce Result Review slouží k zobrazení výsledků jednotlivých testů.

The screenshot displays the 'Result Review' menu interface. The top navigation bar includes 'Spustit test', 'Stav testů', and 'Výsledky testů'. Below this, there are date filters (2021.03.23 to 2021.06.23), a search field for patient ID, and a dropdown menu set to 'COVID-19 Ag'. Two tables are displayed: Table A (left) shows test details with columns 'C.', 'Datum', 'Čas', and 'ID pacienta'. Table B (right) shows test results with columns 'C.', 'Položka', 'Výsledek', 'Jednotky', and 'Ref.'. Both tables are highlighted with red boxes and labeled with large red letters 'A' and 'B' respectively. At the bottom, there are buttons for 'Vymazat vše', 'Poslat záznam', and 'Smazat záznam'. The status bar at the very bottom shows 'S/W : V001.036, F/W : 1.1', 'USB', and the time '10:08:52 | 2021.06.23'.

Zvolte možnost „All“ v rozbalovacím menu v pravém horním rohu.

Toto menu je rozděleno do dvou sekcí (A a B viz. Obrázek)

Při zvolení testu v sekci A, se vám v sekci B zobrazí všechny výsledky pro pacienta s daným Patient ID.

Díky funkci „Search“ můžete vyhledávat výsledky v historii právě v závislosti na ID pacienta.

Kalibrace přístroje:

Kalibrace slouží ke kontrole správné funkce přístroje.

Kdy kalibrovat ?

Upustili jste přístroj.

Výsledky neodpovídají očekávaným hodnotám.


Kontrola správné funkce přístroje.

Po uplynutí nastavené doby platnosti kalibrace v přístroji.

Jak kalibrovat?

Připravte si kalibrační set, který obsahuje 3 kazetky (CAL-1 , CAL-2, CAL-3).

Stiskněte „Calibration“ v horní části displeje.

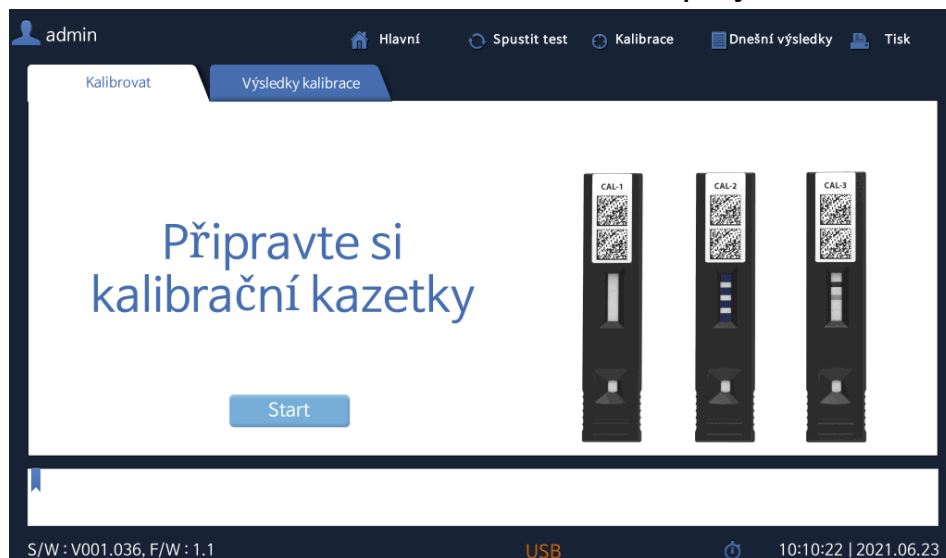

Postupujte podle příkazů přístroje, který vás postupně vyzve ke vložení všech kalibračních destiček.

Pokud vše proběhlo v pořádku, měla by se zobrazit tato stránka:

admin

Hlavní Spustit test Kalibrace Dnešní výsledky Tisk

Kalibrovat Výsledky kalibrace

Kontola kalibrace

Tisk OK

OK

CAL-1 OK / OK
CAL-2 OK / OK
CAL-3 OK / OK

Datum/Cas
2021-06-23 10:40:48

ID operátora
admin

Vyrobeno
19.11.13

Verze S/W
V001.036

S/W : V001.036, F/W : 1.1

USB

10:40:53 | 2021.06.23