

LINEA *gluco* Calibra

Katalógové číslo: LG 2004

Balenie: 1 x 10 ml

Pre in vitro diagnostické použitie.

Iba pre profesionálne použitie.

Určenie

Kalibračný roztok je určený iba pre glukózové analyzátory, ktoré stanovujú glukózu v predriedenej vzorke na princípe elektrochemického enzymatického stanovenia glukózy.

Použitie

Kalibračný roztok sa používa iba nariadený v pomere 1:50. Riedi sa roztokom LINEA *gluco* Systema a to rovnako ako vzorky glukózy, ktoré sa stanovujú na glukózovom analyzátore.

Zloženie

Kalibračný roztok obsahuje glukózu s koncentráciou 12 mmol/l po nariadení. Ako konzervačné činidlo obsahuje azid sodný (koncentrácia $\leq 0,01\%$).

Reagencie potrebné na stanovenie, nie sú súčasťou súpravy

- Pipety
- Linea *gluco* Systema, kat.č. LG3823

Upozornenia

- Iba pre in-vitro diagnostiku.
- Iba pre profesionálne použitie.
- So všetkými vzorkami krvi a plazmy treba zaobchádzať ako s potenciálne infekčnými. Odpad zlikvidujte podľa platných predpisov.
- Kalibračný roztok obsahuje azid sodný ako konzervačné činidlo. Zabráňte dotyku s pokožkou a sliznicami. Postihnuté miesto vymyte množstvom vody. Pokiaľ potiaže pretrvávajú, obráťte sa na lekára .
- Zabráňte kontaminácii kalibračného roztoku.

Uskladnenie a stabilita

Kalibračný roztok musí byť uskladnený v chlade pri teplote 2-8°C. Kalibračný roztok je stabilný do dátumu expirácie, ktorý je vytlačený na obale, pokiaľ je uskladnený pri uvedených podmienkach.

Príprava a vykonanie testu

- Vyberte kalibračný roztok z chladničky a pripravte si kalibračnú vzorku nariadením v pomere 1:50 so systémovým roztokom Linea *gluco* Systema (kat.č. LG3823).
- Takto pripravenú kalibračnú vzorku použite podľa „Prevádzkových pokynov“ k používanému glukózovému analyzátoru.
- Rovnakým spôsobom si pripravte vzorky pacientov a potom ich analyzujte na analyzátore.
- Kalibračný roztok vráťte ihneď po použití do chladničky pri 2-8°C.

Karta bezpečnostných údajov sa nachádza na www.eurolambda.sk, alebo na požiadanie u distribútora.

Výrobca a distribútor:

Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2, Trnava
Tel.: +421 33 5341 448
Fax: +421 33 5443 094
www.eurolambda.sk

Rev. 12/2012